



 PROTECCIÓN RESPIRATORIA

**MASCARILLA FACIAL ANTIBACTERIAL**

---

# ÍNDICE

## CONTENIDO

<b>SKU</b> .....	01
<b>ESPAÑOL</b>	
Características .....	02
Instrucciones de montaje y ajuste .....	02
Certificaciones .....	04

**SKU**

904254	Mascarilla Facial Antibacterial	 Argentina
--------	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

## CARACTERÍSTICAS

- Descartable.
- El cuerpo de la máscara facial se coloca se une o se moldea entre las capas de tela.
- La mascarilla no se desintegrará partirá ni rasgará durante el uso previsto.
- La mascarilla tiene un medio por el cual puede ajustarse estrechamente te sobre la nariz la boca y el mentón del usuario y asegura que la mascarilla se ajuste a los lados.
- Está diseñada para brindar protección contra salpicaduras y gotas direccionadas hacia y desde el usuario.
- Puente nasal para mejorar el ajuste al colocarse sobre el contorno de la nariz.
- Las capas interna y externa están hechas de telas no tejidas de polipropileno y la capa intermedia está hecha de tela de polipropileno soplado por fusión.
- Medida: 17.5 cm de longitud x 9.5 cm de altura.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

### ADVERTENCIAS

1. Las mascarillas Tipo I solo deben usarse para pacientes y otras personas para reducir el riesgo de propagación de infecciones particularmente en situaciones de epidemia o pandemia.
2. No están destinadas a ser utilizadas por profesionales de la salud en un quirófano o en otros entornos médicos con requisitos similares.

## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE**

### **USO:**

1. Protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas. Uso regular para evitar la propagación de bacterias y virus transmitidos con esputo.

## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE**

### **INSTRUCCIONES DE USO**

1. Antes de tocar una mascarilla limpia debe haber un previo lavado de manos con agua y jabón.
2. Una vez se haya tomado una mascarilla nueva (sin uso) de la caja revisar para asegurar que no tenga defectos agujeros ni desgarros en el material. Si la mascarilla tiene alguna de estas deficiencias desechar y sacar otra nueva en la caja.
3. Orientar la parte superior de la mascarilla correctamente para que quede lo más cerca posible de la piel tener en cuenta que la parte superior de la misma tiene un borde flexible con una cinta metálica recubierta que puede moldear alrededor de la nariz. Cerciorarse que ese lado este orientado hacia arriba antes de colocar la mascarilla.
4. Fijar la mascarilla hacia la cabeza por medio de las dos bandas para las orejas. Tomar las bandas y poner una alrededor de una de las orejas y luego la otra alrededor de la del otro lado.
5. Ajustar la pieza que va en la nariz cuando la mascarilla este en su lugar en la cabeza y la cara usar el dedo índice y el pulgar para pellizcar la parte flexible de su borde superior alrededor del puente de la nariz para buscar que haya un ajuste correcto.
6. Ajustar la mascarilla en la cara y debajo de la barbilla una vez que este totalmente asegurada acomodar para que cubra la cara y la boca de modo que el borde inferior quede debajo de la barbilla.

### **CERTIFICACIONES**

ANMAT